


# Souprava zdravotnických prostředků Danis

SX-ELLA Stent Danis

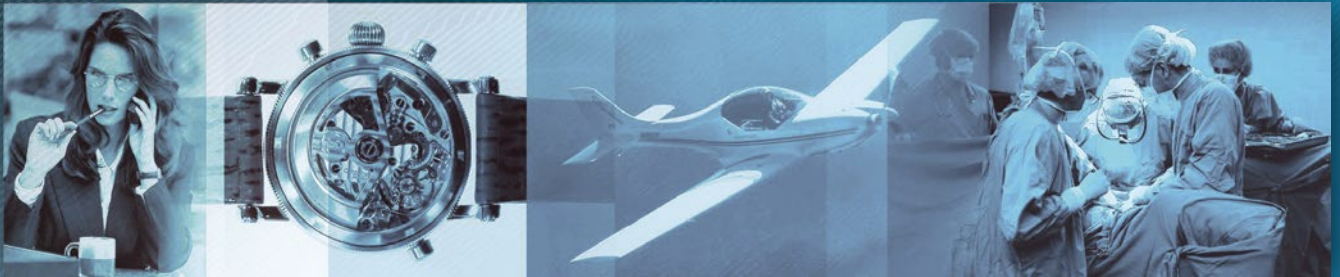

# Danis



Vyjímatelný stent pro zastavení akutního krvácení z jícnových varixů

Jednoduché zavedení bez nutnosti endoskopické či radiologické kontroly

Bezpečná zástava krvácení okamžitým stlačením jícnových varixů

Umožnění perorálního příjmu potravy po zavedení stentu



3D animace



## Základní popis

# Souprava zdravotnických prostředků s SX-ELLA Stentem Danis

Plně krytý samoexpandibilní nitinolový stent připravený k implantaci. Kompletní implantační set zahrnuje veškeré součásti pro zavedení.

## Indikace

Stent Danis je určen k zástavě akutního krvácení z jícnových varixů. Implantaci stentu je, v případě masivního obtížně zvládnutelného krvácení z jícnových varixů, možné zvážit jako alternativu k akutnímu TIPS nebo použití balónkové sondy.

## Kontraindikace

- ✓ Jícnové striktury
- ✓ Radioterapie jícnu
- ✓ Zhoubný nádor hrdla nebo hrtanu, jícnu nebo žaludku
- ✓ Krvácení způsobené jiným poškozením horní části GIT (např. perforace)

## Unikátní vlastnosti

- ✓ Variabilní výplet je přizpůsoben jícnové peristaltice - nižší stupeň migrace.
- ✓ Variceální komprese způsobuje efektivní zástavu krvácení.
- ✓ Atraumatické konce stentu.
- ✓ Rentgenkontrastní značky na obou koncích a uprostřed stentu - přesné umístění stentu.
- ✓ Vývazové lanko ze speciální slitiny pro medicínské účely na obou koncích stentu - vysoká pevnost a odolnost proti kyselinám.
- ✓ Jednoduché vyjmutí po 7 dnech od implantace.

## Výhody této metody

- ✓ Snadné zavedení i v závažných situacích, bez nutnosti endoskopie / kontroly rentgenem.
- ✓ Perorální příjem vhodné stravy je možný ihned po implantaci.

## Doplňující údaje




Souprava zdravotnických prostředků Danis (019-08S-25-135) se skládá z plastového kufříku, který obsahuje všechny součásti potřebné pro implantaci stentu:

- ✓ Komprimovaný stent v zaváděcím systému, vodící drát, plastové injekční stříkačky, náustek, emetní miska, papírový bryndáček, plastový pytel na odpadky, sterilní rukavice.

Basic set zdravotnických prostředků Danis (019-08S-25-135-B) obsahuje:

- ✓ Komprimovaný stent v zaváděcím systému, vodící drát, 50 ml plastová injekční stříkačka.

Zaváděcí systém 9,4 mm (28 F) / 6,6 mm (20 F) je dodáván ve standardní délce 60 cm.

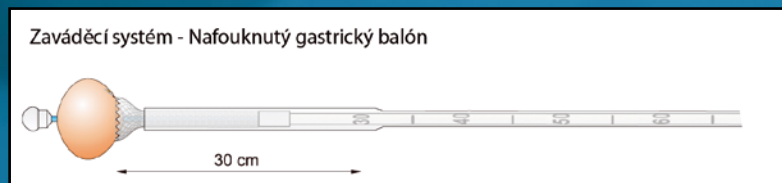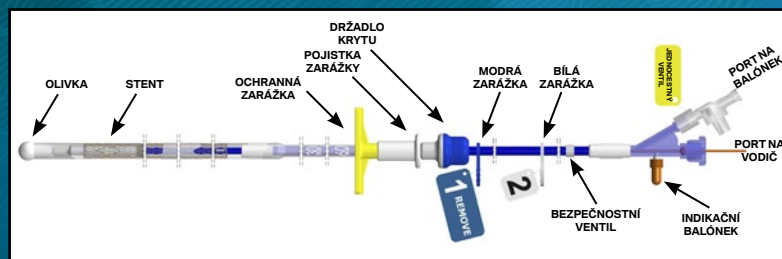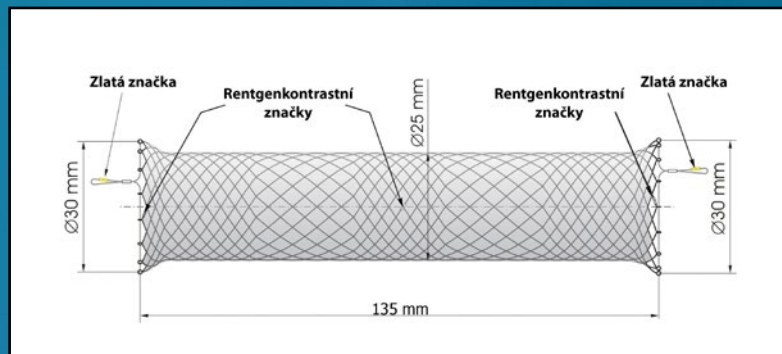

## Nabízené rozměry

Číslo REF	SX-ELLA Stent Danis			Zaváděcí systém	
	Průměr hrdla stentu [mm]	Průměr těla stentu [mm]	Nominální délka [mm]	Aktivní délka [mm]	Vnější průměr [F]
019-08S-25-135	30	25	135	60	28 / 20
019-08S-25-135-B	30	25	135	60	28 / 20

Výrobce:

**ELLA-CS, s.r.o.**

Milady Horákové 504/45, Třebeš  
500 06 Hradec Králové, Česká republika

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655  
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu