



Enterella

SX-ELLA Stent Pyloroduodenální

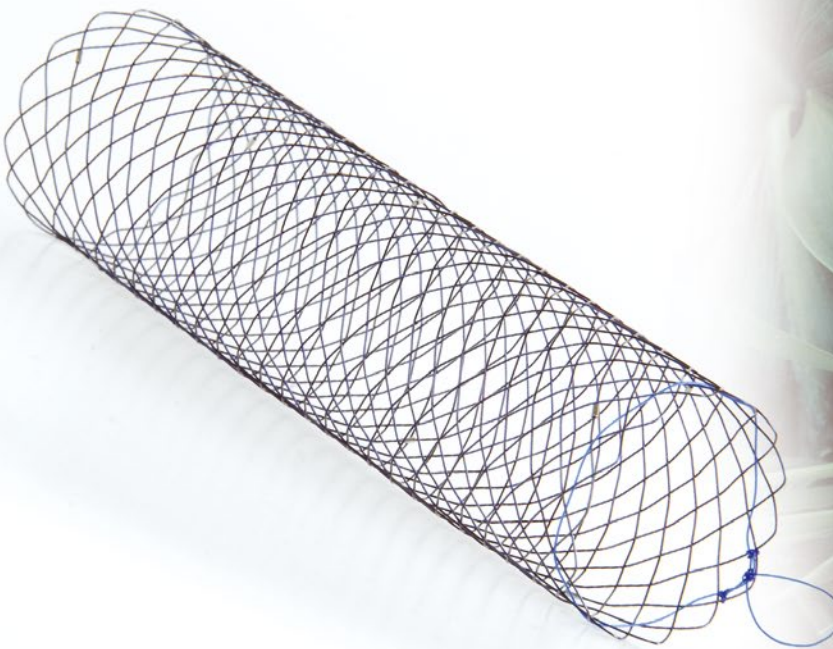

Enterella

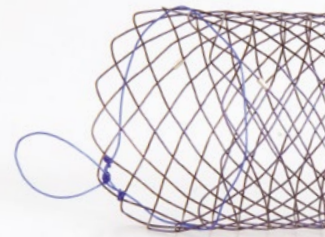

Snadné uvolnění

Vynikající flexibilita

Atraumatické konce stentu

Hladký povrch v ohybu stentu



Základní charakteristika

SX-ELLA Stent Pyloroduodenální – Enterella

Stent lze zavést pod endoskopickou nebo fluoroskopickou kontrolou. Samoexpandibilní nitinolový stent připravený k implantaci v zaváděcím systému PULL.

Indikace

Stent je indikován pro paliativní léčbu striktur pyloru nebo duodena a/nebo obstrukcí způsobených maligními tumory.

Kontraindikace

- ☑ Střevní ischémie
- ☑ Střevní perforace
- ☑ Peritoneální absces
- ☑ Významný ascites
- ☑ Závažná koagulopatie

Unikátní vlastnosti

- ☑ Atraumatické konce - účinná prevence poranění žaludeční / duodenální stěny.
- ☑ Vynikající ohebnost - dokonalé přizpůsobení podél anatomických zakřivení.
- ☑ Rentgenkontrastní značky na obou koncích a uprostřed stentu - lepší viditelnost; přesné umístění stentu.
- ☑ Plastové repositionální vlákno na proximálním konci stentu - možnost repozice během 5 dnů po implantaci.
- ☑ Oplétaný zaváděcí systém odolný proti zalomení - snadné zavedení a rozvinutí stentu.


Doplňující údaje

K dispozici je 10,5 F (3,5 mm) zaváděcí systém ve standardní délce 210 cm, který je možné zavést pracovním kanálem endoskopu. Rentgenkontrastní a atraumatická ovlivka zaváděcího systému. Doporučený tuhý vodící drát o průměru 0,035" (0,89 mm).

Nabízené rozměry


Číslo REF	Nominální průměr [mm]	Nominální délka [mm]
019-04-20-082	20	82
019-04-20-090	20	90
019-04-20-113	20	113
019-04-20-135	20	135
019-04-22-082	22	82
019-04-22-090	22	90
019-04-22-113	22	113
019-04-22-135	22	135
019-04-25-082	25	82
019-04-25-090	25	90
019-04-25-113	25	113
019-04-25-135	25	135

Zaváděcí systém odolný proti zalomení

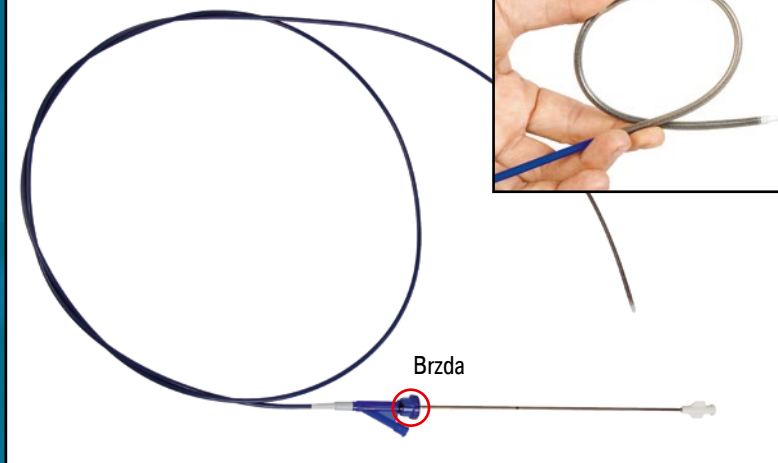


Brzda


Žlutá vizuální značka a rentgenkontrastní prsteneček

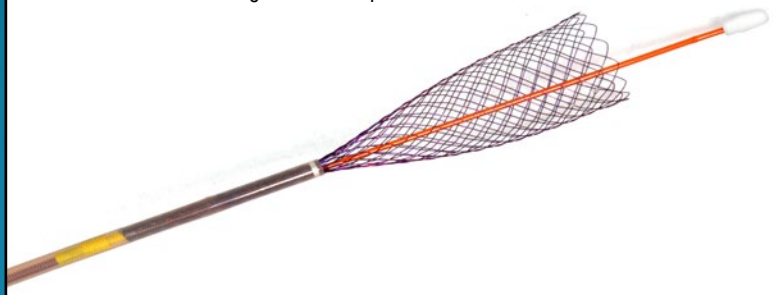


Rentgenkontrastní značky

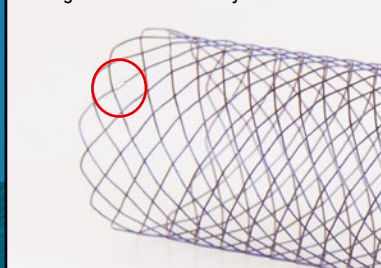

Plastové repositionální vlákno

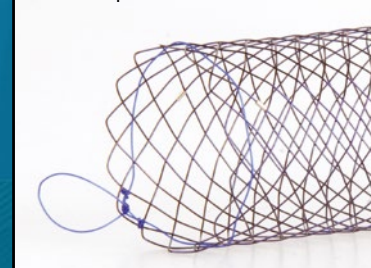

Snadné rozvinutí

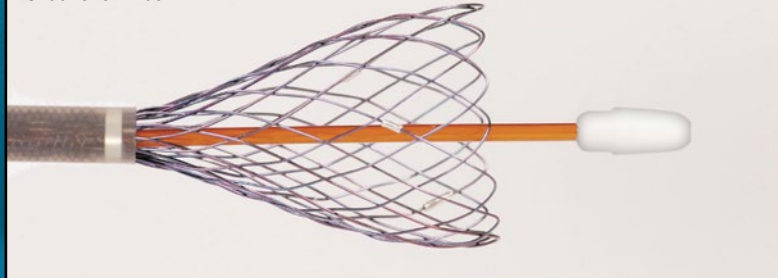

Atraumatické konce stentu



Výrobce:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horákové 504/45, Třebeš
500 06 Hradec Králové, Česká republika

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu